

DUO KIT: DER NÄCHSTE LEVEL

10 km/h unterwegs ohne Fahrpult und ohne Kraftauwand



Mit dem Duo Kit kann beinahe jeder Rollstuhl ausgerüstet werden. Damit stehen verschiedene Antriebsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Freewheel-Modus fährt der Benutzer, wie mit jedem normalen Rollstuhl, mit der eigenen Kraft. Daneben gibt es jedoch zusätzliche, elektrisch unterstützte Fahr-Modi, die einerseits kraftunterstützend sind, andererseits aber einen eigenständigen, permanenten Elektroantrieb zur Verfügung stellen bei dem der Fahrer mittels bremsen eines Rades die Fahrtrichtung bestimmt. Der kraftunterstützende Modus kann sowohl vom Fahrer über die Greifreifen, oder durch die Begleitperson mittels (An)-schieben oder, z.B. von Hemiplegikern, auch mittels trippeln aktiviert werden. So steht für jede Situation die entsprechende Lösung zur Verfügung.

Die drei Fahrmodi des Duo Kit:

1. Freewheel: Kein Antrieb, der Rollstuhl lässt sich normal über die Greifreifen bedienen.
2. Kraftunterstützend: Egal ob am Greifreifen, durch die Begleitperson mittels Schieben oder durch den Fahrer selbst mittels Trippeln ein Initialanschub erfolgt, der elektrische Antrieb setzt ein.
3. Selbstständiger Elektroantrieb: Sobald ein Initialanschub erfolgt (egal über Greifreifen, An-schieben durch Begleitperson oder mittels Trippeln) setzt ein permanenter Elektroantrieb ein.

Features:

Geschwindigkeit:	10 km/h	Batterie:	Lithium 10 Ah
Reichweite:	ca. 18 km	Ladedauer:	ca. 3 Stunden
Gewicht pro Rad:	4,5 kg	Radgrösse:	24"
Steigfähigkeit:	6° / 10,5%	Motoren:	2 x 250 W

GLOOR REHAB. & Co AG

Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 50 • Fax 062 299 00 53
mail@gloorrehab.ch www.gloorrehab.com

Duo Kit

Datum:

Offerte

Bestellung

Bearbeiter:

Fachhändler / Kunde:



Duo Kit, 10 km/h ohne Fahrpult und ohne Kraftauwand

Die drei Fahrmodi des Duo Kit:

1. Freewheel: Kein Antrieb, der Rollstuhl lässt sich normal über die Greifreifen bedienen.
2. Kraftunterstützend: Egal ob am Greifreifen, durch die Begleitperson mittels Schieben oder durch den Fahrer selbst mittels Trippeln ein Initialanschub erfolgt, der elektrische Antrieb setzt ein.
3. Selbstständiger Elektroantrieb: Sobald ein Initialanschub erfolgt (egal über Greifreifen, Anschieben durch Begleitperson oder mittels Trippeln) setzt ein permanenter Elektroantrieb ein

	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis (exkl. MwSt)
<input type="checkbox"/>	Duo Kit	Duo Kit komplett inkl. Li-Ionen-Akku und Ladegerät	Fr. 9'490.00

GLOOR REHAB. & Co AG

Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 50 • Fax 062 299 00 53
mail@gloorrehab.ch www.gloorrehab.com